

beurer

Kuulmisvõimendi Kasutusjuhend HA20



Beurer GmbH • Soflinger Str. 218 • 89077 Ulm (Saksamaa)
Tel. +49 (0) 731/39 89-144 • Faks: +49 (0) 731/ 39 89-255
www.beurer.com • E-post: kd@beurer.de



Seadme komplekti kuuluvad esemed

- Kuulmisvõimendi
- Kolm erinevate mõõtmega kõrvatroppi
- Kaks LR754 nõõppatareid
- Üks sametist hoiukarp
- Käesolev kasutusjuhend



Hea klient!

Täname, et ostsite meie toote. Meie kaubamärgi alla kuuluvad kõrgekvaliteetsed põhjalikult katsetatud tooted, mis on mõeldud kasutamiseks järgmistes valdkondades: soojendamise, kaalumise, vererõhu, kehatemperatuuri ja pulsi mõõtmine, rahustav teraapia, ilu, massaaž ja õhk.

Lugege see juhend põhjalikult läbi ja hoidke kohas, kus ka teised seadme kasutajad selle vajadusel kätte saavad.


Lugupidamisega, teie Beurer


1. Kasutusotstarve


Kuulmisvõimendi on mõeldud kasutamiseks ainult abivahendina inimeste kuulmise parendamiseks. Seadet tohib kasutada ainult selles kasutusjuhendis kirjeldatud eesmärgil. Tootja ei võta endale vastutust seadme sobimatust või hooletust kasutamisest tuleneva kahju eest. Kuulmisvõimendi ei ole raviseade.

2. Märgid ja sümbolid

Selles juhendis kasutatakse järgmisi sümboleid.

 **HOIATUS!** Vigastuse või tervisekahjustuse oht.

 **OLULINE!** Ohutusmärkus, mille eiramisel võite toodet / tarvikuid kahjustada.

 **Märkus** Olulist teavet sisaldav märkus.


3. Seadme tundmaõppimine

Kuulmisvõimendi on mõeldud kasutamiseks abivahendina inimeste kuulmise parendamiseks. See võimendab helisid ja edastab need seejärel kõrva. Kuulmisvõimendi ei enneta ega leevenda kaasasündinud kuulmislangust.

Kuulmisvõimendit saab kasutada erineval viisil. Ei ole vahet, kas soovite vaadata filmi, sõpradega juttu ajada või loodushääli kuulata – kuulmisvõimendi võimaldab kuulata helisid valjemini ja selgemalt.

4. Hoiatused ja ohutusmärgused

 **HOIATUS!**

- ÄRGE kasutage kuulmisvõimendit keskkõrvapõletiku või kõrvakanalipõletiku korral.
 - ÄRGE kasutage kuulmisvõimendit maksimumvõimsusel pikka aega järjest. See võib kuulmist kahjustada.
 - Kui tunnete kuulmisvõimendi kasutamise ajal ebamugavustunnet või valu, lõpetage kasutamine kohe ja pidage nõu arstiga.
 - Kui kõrv muutub põletikuliseks või tekib nahaärritus või kuulmisvõimendi kasutamise ajal tekib kõrvadesse palju vaiku, lõpetage kasutamine kohe ja pidage nõu arstiga.
 - Seade ei ole mõeldud kasutamiseks piiratud füüsiliste, sensoorsete ja vaimsete võimetega isikutele ega isikutele, kellel puuduvad kogemused või oskused seadme kasutamiseks (sh lapsed), väljaarvatud nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või juhendamisel. Ärge lubage lastel seadmega mängida.
 - ÄRGE kasutage kuulmisvõimendit võimalikus plahvatusohtlikus keskkonnas.
 - Hoidke kuulmisvõimendi, tarvikud ja patareid lastele kättesaamatult. Lapsed võivad need suhu panna ja alla neelata.
 - Patareid tuleb hoida lastele kättesaamatus kohas. Lapsed võivad patareid suhu panna ja alla neelata. See võib olla väga ohtlik. Patarei allaneelamise korral võtke kohe ühendust arstiga!
 - Tavalisi patareisid ei tohi uuesti laadida, kuumutada ega tulle visata (plahvatusoht!).
 - Lekkivad või kahjustunud patareid võivad nahka kahjustada. Kasutage nende käsitlemisel sobivaid kindaid.
 - Kahtluste korral ärge seadet kasutage ja võtke ühendust seadme edasimüüja või klienditeenindusega.
 - Kui seade on kahjustada saanud või selle töös esineb tõrkeid, siis lülitage seade kohe välja.
 - Ärge proovige seadet ise lahti võtta ega parandada. Seadet tohib remontida ainult klienditeeninduses või volitatud edasimüüjate juures. Selle eeskirja eiramine muudab seadme garantii kehtetuks.
-  **OLULINE!**
- ÄRGE kandke kuulmisvõimendit vannis, duši all ega ujudes.
 - ÄRGE kandke kuulmisvõimendit kosmeetikatoodete pealekandmise ajal (näiteks meigitooted, juukselakk, parfüüm või päikesekaitsekreem).
 - ÄRGE kandke kuulmisvõimendit raviseansi ajal, kus kasutatakse lühilaineid või tugevaid

raadiosageduslaineid või magnetvälju.

- ÄRGE kandke kuulmisvõimendit tugevate elektromagnetväljade ega röntgenkiirte lähedal.
- Kaitske seadet mahakukkumise, niiskuse, mustuse, äärmuslike temperatuurikõikumiste ja otsese päikesevalguse eest.
- Ärge kuivatage kuulmisvõimendit mikrolaineahjus!
- Hooldage kuulmisvõimendit regulaarselt. Kõrvatropi ja kuularite vahel ei tohi olla võõrkehi, sest see võib heli mõjutada.
- Patareisid ei tohi osadeks lahti võtta ega lühisesse ajada.
- Lekkivad patareisid võivad seadet kahjustada. Kui te seadet pikemat aega ei kasuta, võtke sellest patareisid välja.

5. Seadme kirjeldus

1 Mikrofon


2 Helitugevuse reguleerimise nupp

3 Sisse-välja lülitamise nupp
("I" = sees, "O" = väljas)

4 Patareisahahtel

5 Kuularid




6 Kõrvatropp

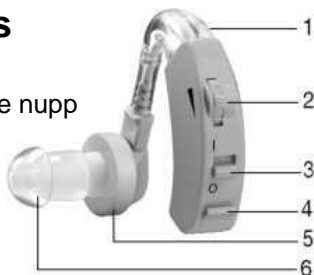

6. Kasutamine

Võtke kuulmisvõimendi pakendist välja ja kontrollige, et kõik tarvikud oleksid olemas ja terved ja seade ise oleks kahjustamata.

1. Avage kuulmisvõimendi patareisahahtel, nagu on näidatud joonisel.
2. Sisestage patareisahahtlisse seadmega kaasasolevad nõoppatareisid (tüüp LR754), nagu on näidatud joonisel. Patareide sisestamisel järgige pooluste (+/-) märgistust.
3. Sulgege patareisahahtel. Ühendage soovitud kõrvatrop kuularite külge.

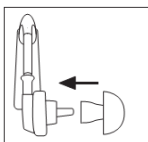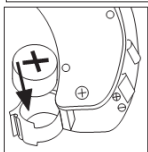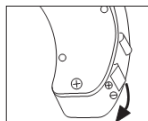

- i** Kontrollige enne kuulmisvõimendi sisselülitamist, et helitugevuse reguleerimise nupp oleks seatud kõige madalamale sättele.

4. Viige kuulmisvõimendi kõrva juurde, nagu on näidatud joonisel. Sisestage kõrvatrop aeglaselt kõrva (ärge suruge jõuga).



Ärge sisestage kõrvatropi liiga sügavale. Kui kõrvatrop ei jää õigesti oma kohale või tundub ebamugav, proovige teistsugust kõrvatropi.

5. Kuulmisvõimendi sisselülitamiseks liigutage sisse-välja lülitamise nupp asendisse "I". Reguleerige helitugevus soovitud tasemele, nii et kuulete helisid selgelt ja äratuntavalt.

- i** Kui kuulete kuulmisvõimendi kasutamise ajal vilisevat heli, kontrollige, kas kõrvatrop on

korralikult kõrvas. Kui see ei ole piisaval tihedalt kõrvas, kasutage teistsugust kõrvatropi.

7. Hooldamine ja puhastamine



OLULINE!

- Enne puhastamist võtke seadmest patareisid välja.
- Puhastage kuulmisvõimendi ja kõrvatropid pärast iga kasutuskorda puhta kuiva lapiga. Kui need on väga määrduvad, võite lappi niisutada pehmetoimelises seebivees. Ärge kasutage abrasiivseid, söövitavaid ega lahustipõhiseid puhastustooteid!
- Laske kuulmisvõimendil pärast kasutamist täielikult kuivada. Hoidke kuulmisvõimendit ohutus, kuivas ja puhtas kohas.
- Kuulmisvõimendit ei tohi hoida vee all, sest vesi võib seadmesse sisse pääseda ja seda kahjustada.
- Kui te seadet pikemat aega ei kasuta, võtke sellest patareisid välja. Nii väldite võimalikke lekkeid.


8. Kasutuselt kõrvaldamine

Seadmete kasutuselt kõrvaldamisel tuleb järgida Euroopa Nõukogu direktiivis 2002/96/EÜ-WEEE (elektrilised ja elektroonilised jäätmed) sätestatud nõudeid. Küsimuste korral võtke ühendust jäätmekäitluse eest vastutava kohaliku asutusega.



Tühjad patareisid tuleb viia vastavasse kogumispunkti. Teil on seadusjärgne kohustus neist ohutult vabaneda.

Märkus: kahjulikke aineid sisaldavatel patareidel on järgmine märgistus: Pb = pliid sisaldav patarei, Cd = kaadmiumi sisaldav patarei, Hg = elavhõbedat sisaldav patarei.

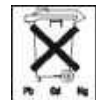

9. Seadme töös tekkida võivad probleemid

Probleem	Võimalikud põhjused
Kuulmisvõimendist ei kostu helisid.	- Kuulmisvõimendi ei ole sisse lülitatud. - Patareisid ei ole õigesti sisestatud. - Patarei on tühi. - Mikrofon on määrduvad. - Kuulmisvõimendi on kahjustunud.
Kuulmisvõimendi on väga vaikne.	- Kuulmisvõimendi helitugevuse tase on liiga madal. - Patarei on tühi. - Kõrvatrop on määrduvad. - Mikrofon on määrduvad.

10. Tehniline spetsifikatsioon

Maksimaalne heliväljund 128 dB
Helivõimendus: kuni 40 dB
Sagedusvahemik: 200 – 5000 Hz
Sisendmüra: 30 dB
Pinge: 1,5 V
Üldine moonutus: 5%
Toiteallikas: 4 mA

Hooldustöökoode: Renerki Teenindus, Tammsaare tee 134B, Tel. 60 50 319, klienditeenindus@renerk.ee, Tööajad E-R 10:00-17:00

Maaletooja: Sandmani Grupi AS, Tammsaare tee 134B, Tallinn 12918