

ALKOMETRA „Alcoscan2700” LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Paldies, ka esat iegādājušies alkometru „Alcoscan2700”!



Alkometrs „Alcoscan2700” spēj noteikt reibuma pakāpi robežās 0-4% - tas ir drošs un uzticams sabiedrotāis! „Alcoscan2700” piemīt augsts jutīgums pret alkoholu, un uz tā rādījumiem var paļauties. Vēl vairāk: „Alcoscan2700” ļauj ātri veikt vairākus testus pēc kārtas un labākas kvalitātes nodrošināšanai ir kalibrējams. Priekš drošas braukšanas pēc ballītes!

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Nekādā gadījumā nelietot ierīci, ja pēdējo 30 minūšu laikā ir lietots alkohols, kā arī, ja pēdējo 20 minūšu laikā ir smēķēts (attiecas arī uz piepīpētām telpām)!

1. Nospiediet un aptuveni 1 sekundi turiet nospiestu apaļo pogu zem ekrāna.
2. Uz alkometra ekrāna parādās 0.8.8 (uz mirkli), un iedegas bateriju indikatoru, kas uzreiz arī izdziest. Pēc tam uz ekrāna parādās cipari, kas mainās – tas nozīmē, ka notiek ierīces automātiskā sagatavošanās darbam, kuras gaitā tiek iesildīts un stabilizēts mērījumu sensors. Secībai, kādā mainās cipari, nav nozīmes.
3. Ierīces sagatavošanās darbam parasti ilgst apmēram 30 sekundes, taču var ilgt arī līdz 2 minūtēm.
4. Alkometrs ir gatavs darbam, kad nodziest uzraksts „WAIT”, uz ekrāna parādās 0.00 un atskan 2 pīkstieni.
5. Iepūtiet (ne pārāk stipri, drīzāk viegli, apmēram tā, it kā svilpojot) atverē, kas atrodas virs alkometra ekrāna, turot alkometru aptuveni 1-2 cm attālumā no mutes. **Pūtiet vismaz 4 sekundes (neatkarībā no iespējamā skana signāla).**

Uz ekrāna parādās reibuma pakāpes rādītājs, un par testa beigām ziņo arī skaņas signāls, kas atbilst reibuma pakāpei:

- Rezultāts 0,0-0,2 % – 1 pīkstiens (rezultāta „0” gadījumā pīkstiens var neatkāņēt, mazākais reibuma rādītājs ir 0,15%);
- Reibums 0,3-4% – 5 sekundes ilgs skaņas signāls.

Promilēs izteikts reibuma rādītājs ciparu veidā (g/l jeb alkohola saturs gramos litrā asins) redzams uz ekrāna 5 sekundes. Ja rādītājs ir mazāks par 0,2‰, reibums tiek rādīts ar promilēs simtdaļas precizitāti, 0,2-4‰ robežās reibums tiek rādīts ar 0,1‰ precizitāti.

Reibuma rādītājs tiek rādīts uz ekrāna tikai 3-4 sekundes, pēc tam alkometrs sagatavojas jauna testa veikšanai, atskaitot uz ekrāna redzamos ciparus atpakaļ līdz nullei.

Alkometrs ir gatavs jauna vai atkārtota testa veikšanai, kad uz ekrāna atkal parādās 0.00 (tajā pašā laikā nedrīkst izgaismoties uzraksts „WAIT”).

Tā kā bez caurulītes alkometra testa rezultātu var ietekmēt arī pūšanas veids (leņķis, attālums, stiprums), precīza rezultāta iegūšanai ieteicams **iepūst alkometrā pāris reizes pēc kārtas**. Par pareizu jāuzskata atkārtotās pārbaudēs iegūtais lielākais reibuma rādītājs. Pārlietu stipras pūšanas rezultātā sensors var tikt bloķēts (tādā gadījumā uz ekrāna redzama 0.00, ierīce uz brīdi jāizslēdz).

Ja alkometrs netiek izmantots 1-2 minūtes, bateriju enerģijas ekonomijas nolūkā ierīce automātiski izslēdzas.

Ierīces tehniskie dati:

<i>Mērīdiapazons:</i>	0,15-4 ‰ promiles (mērījumu precizitāte +/- 0,1‰, rezultātā 0,5‰)
<i>Barošanas avots:</i>	2 x 1,5V AA/LR6 <i>alkaline</i> (sārma) baterijas
<i>Ekrāns:</i>	Digitālais (ar ciparu rādītājiem) LCD ekrāns
<i>Testa ilgums</i>	jāpūš 4 sekundes
<i>Sagatavošanās laiks</i>	pāriešana darba režīmā ilgst apmēram 10-120 sekundes
<i>Izmēri:</i>	104x40x20mm
<i>Svars</i>	kopā ar baterijām 85g
<i>APSTIPRINA :</i>	EATA, D.O.T., CE, ISO 9001:2000
<i>Kalibrēšana:</i>	laboratorijas apstākļos ar BAC-simulatoru
<i>Komplektā ietilpst:</i>	Alkometrs „Alcoscan2700”, lietošanas instrukcija, baterijas (AA 2 tk.).
<i>Kalibrēšana:</i>	laboratorijas apstākļos, izmantojot BAC simulatoru

Kalibrēšanas periods – reizi 4-6 mēnešos vai pēc 100-150 mērījumiem (kas pienāk ātrāk)

SVARĪGI!

- ✓ Ja uz ekrāna sāk mirgot baterijas indikators (pēc tam, kad beidzies ierīces sagatavošanās process darbam), baterijas ir tukšas un tās ir jānomaina. Ar tukšām baterijām sniegtie ierīces rādītāji nav pareizi. Izmantojiet tikai *alkaline* (sārma) baterijas. Var izmantot arī akumulatorus (sākot no 1800mAh). Ievietojot jaunus baterijas, ievērojiet polaritāti.
- ✓ Ja alkometrs ilgāku laiku netiek izmantots (ilgāk par 2 nedēļām), izņemiet, lūdzu, baterijas, glabājiet alkometru sausā vietā un sargājiet no tiešas saules staru iedarbības, mehāniskiem bojājumiem un mitruma. Alkometru ieteicams ieslēgt vismaz reizi 2 nedēļās.
- ✓ Patieso reibuma pakāpi ar alkometru var noteikt ne agrāk kā 30 minūtes pēc alkohola lietošanas, jo pēc tāda laika alkohols nokļūst asinīs. Nosakot reibuma pakāpi agrāk, testa rezultātu var ietekmēt arī alkohola izgarojumi no mutes. Maksimālās reibuma pakāpes sasniegšanas ātrumu un atskuršanai nepieciešamo laiku var ietekmēt daudzi faktori (ēdiens/dzēriens, veselības stāvoklis u. tml.), un vienam un tam pašam cilvēkam dažādās reizēs tie var būt atšķirīgi.
- ✓ Nedrīkst pūst alkometrā, ja ir pagājušas mazāk kā 30 minūtes pēc alkohola lietošanas.
- ✓ Nekādā gadījumā nepieļaujiet alkometra saskarsmi ar šķidrumiem un nonākšanu spēcīgā elektromagnētiskā laukā, sargājiet alkometru no triecieniem.
- ✓ Nekādā gadījumā neizmantojiet alkometru smēķēšanas laikā – cigarešu dūmi var bojāt sensoru. Pārliecinieties, ka smēķēšanas un alkometra izmantošanas starplaiks ir vismaz 15 minūtes.
- ✓ Lai gan šī alkometra mērījumi ir precīzi, testa rezultātus nevajadzētu uzskatīt par absolūti precīziem; nekad nesēdieties pie stūres reibuma stāvoklī! Katra organisma izturība pret alkoholu ir individuāla, taču droša auto vadīšana dzērums stāvoklī nav iespējama. Pie stūres nedrīkst sēdēt arī gadījumā, ja alkometrs reibumu neuzrāda, taču Jūsu pašsajūta vai veselības stāvoklis traucē vadīt automašīnu.

© Šis lietošanas instrukcijas teksts ir „Rovico Büroo OÜ” intelektuālais īpašums un tā reproducēšana bez atļaujas ir aizliegta.

Garantija

Šai ierīcei ražotājs nodrošina **sešu mēnešu garantiju**, skaitot no preces iegādes dienas; garantijas saistības izpilda „Rovico Latvia” un tā pilnvarotās apkopes laboratorijas. Preces iegādes dienu apstiprina rēķins vai kases čeks, vai šīs lietošanas instrukcijas aizpildīta garantijas apliecība, kuru saņēmt, iegādājoties precī. Garantijas preces apmaiņai nepieciešama šī instrukcija un ierīces iepakojums. Ierīci nedrīkst pašrocīgi atvērt: ja ierīces drošības hologramma ir bojāta, garantija zaudē spēku.

Alkometra sensors ir detaļa, kas ekspluatācijas rezultātā nepārtraukti nolietojas, tāpēc ražotājs un „Rovico” tam ir noteikuši 6 mēnešus ilgu garantijas periodu, skaitot no preces iegādes dienas.

Ja Jums šķiet, ka alkometram var būt nepieciešama apkope, griezieties tikai „Rovico Latvia” darbiniešiem pa telefonu +37167249628. Citi ierīces mazumtirgotāji nav kompetenti risināt ar garantiju saistītos jautājumus.

Garantija neattiecas uz baterijām, kalibrēšanas vajadzību vai bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā (tostarp uz ierīces mehāniskiem bojājumiem, mitruma izraisītiem bojājumiem, trieciena rezultātā gūtiem bojājumiem, bojājumiem, kurus izraisījis ierīces nonākšana spēcīgā elektromagnētiskā laukā, saskarsme ar cigarešu dūmiem vai citām gāzēm ar izteiktu smaržu).

Lai izvairītos no kondensācijas ūdens uzkrāšanās (kā rezultātā var rasties mitruma izraisīti bojājumi, uz kuriem garantija neattiecas), šo ierīci nav ieteicams glabāt temperatūrā, kas zemāka par +5°C. Lietošanas laikā ierīces temperatūrai jāpārsniedz +5°C.

NB!Par traucējumiem alkometra darbā var liecināt šādas pazīmes: ja ierīces iesildīšanas procesa laikā uz ekrāna redzams tikai cipars 19 un cipari nemainās, vai ja pagājušas vismaz 6 stundas, kopš alkometrs nav izmantots, taču iesildīšanas procesa gaitā uz ekrāna parādās tikai cipars 1 vai uzreiz 0.00.

Kalibrēšana

Lai nodrošinātu mērījumu precizitāti, alkometram ik pēc 4-6 mēnešiem (vai līdz 150 pūšanas reizēm) nepieciešams veikt kalibrēšanu. Ja alkometrs tiek lietots ļoti intensīvi, ierīci ieteicams kalibrēt ik pēc 3 mēnešiem. Nepieciešamību pēc biežākas kalibrēšanas var izraisīt arī triecieni un ierīces glabāšanas apstākļi. Par vajadzību veikt kalibrēšanu parasti liecina arī ievērojami ilgāks ierīces iesildīšanas process vai garāks sagatavošanās laiks pirms testa atkārtotas veikšanas. Informācija par pēdējo kalibrēšanas laiku atrodama uz kalibrēšanas uzlīmes

Lai veiktu kalibrēšanu, griezieties „Rovico Latvia” darbiniešiem pa telefonu +37167249628.

Kalibrēšanu iespējams veikt tikai laboratorijas apstākļos ar atbilstošu „Guth Laboratories” simulatoru.

Ja alkometra kalibrēšana netiek veikta, alkometrs turpina darboties, taču tā rādītāji var būt maldīgi (vairumā gadījumu rādītāji kļūst lielāki, taču tie var kļūt arī mazāki). Ja alkometra kalibrēšana netiek veikta ilgāku laiku (piemēram, ilgāk par 6 mēnešiem), palielinās risks, ka tiks bojāts sensors dēļ savlaicīgi neveiktas kalibrēšanas.

Athlīdzība

Pievēršam Jūsu uzmanību apstāklim, ka, lai gan ierīces mērījumi ir precīzi, testa rezultātu nevienā gadījumā nevar izmantot tiesā kā pierādījumu, jo šī ierīce nav verificēta (tā kā Igaunijas Republikā uz ierīces pārdošanas brīdi nepastāv nacionālais etalons, uz ierīces pārdošanas brīdi Igaunijā nav iespējams verificēt nevienu alkometru). Ja ierīce uzrāda reibumu un Jums nepieciešams izmantot šo faktu juridiskos procesos, ļaujiet policijai sastādīt protokolu par alkohola reibuma konstatēšanu, jo vajadzības gadījumā policijas kompetencē ietilpst arī asinsanalīzes veikšana.

NB! Ierīces ražotājs, importētājs un tirgotājs nevienā gadījumā neatbild un nevar atbildēt par ierīces rādītāju izraisītām sekām. Automašīnu nav ieteicams vadīt arī gadījumā, ja alkometrs neuzrāda reibumu, tomēr Jūs jūtaties noguris vai nespējīgs vadīt auto. Tas var būt bīstami un arī aizliegts.

Ierīce ražota Rovico, Igaunijā. Rovico ir saņēmis **BUREAU VERITAS sertifikātu** uz alkometru ražošanu, kalibrēšanu, pārdošanu un pilnu servisu.

Ierīce atbilst CE sertifikācijas prasībām.

Ražotājs apstiprina, ka ASV Transporta Ministrija (DOT) ir apstiprinājusi ierīces izmantošanu kā indikatoru pirms asinsanalīžu veikšanas.

Šo alkometru ir atzinusi Eiropas Alkometru Tirgotāju apvienība.

Ierīces importētājs, izgatavotāja pārstāvis Latvijā, finalizētājs un izplatītājs:

„Rovico Latvia”, Dārziema iela 60, 215.kab., Rīga www.alcoscan.lv



twitter.com/roviolatvia



facebook.com/alkometri



dragiem.lv/alcoscan

GARANTIJAS APLIECĪBA:	
(rēķina Nr.)	
Pārdošanas datums: “.....”.....201_ g.	
<small>diena</small>	<small>mēnesis</small>
Tirdzniecības uzņēmuma spiedogs	
Pārdevēja paraksts:	
Piezīme: Aizpildot šo garantijas apliecību, pārdevējs apstiprina, ka viņš ir pilnvarots šīs preces importētāja „Rovico Latvia” vārdā aizpildīt šo garantijas apliecību. Ja garantijas perioda laikā ierīcei jāveic garantijas remonts, ierīces pircējam vai īpašniekam jāgriežas „Rovico Latvia”, tel. +37167249628. Citas personas nav kompetentas risināt ar garantiju saistītos jautājumus. Alkometra sensoram, kurš ekspluatācijas rezultātā nepārtraukti nolietojas, ražotājs un „Rovico” ir noteikuši 6 mēnešus ilgu garantijas periodu, skaitot no preces iegādes dienas. Garantija ir spēkā tikai šajā lietošanas instrukcijā aprakstītajā apjomā un gadījumā, ja ievēroti šajā lietošanas instrukcijā aprakstītie nosacījumi.	

„Rovico Latvia” ir vienīgais likumīgais „Alcoscan” pārstāvis, apkopes nodrošinātājs un tehniskā stāvokļa novērtētājs Latvijā.